

## Istruzioni per il download e installazione dell'app ComfTech "Howdy" su dispositivo iOS.

Per una corretta installazione è necessario:

1) Avere un iPhone con iOS v10.3 o superiore.

2) Condividere a ComfTech l'ID Apple (visualizzabile in 'Impostazioni' dello smartphone).

3) Essere inseriti tra i "beta-tester" di ComfTech:

dopo aver trasmesso l'ID Apple a ComfTech riceverà una mail da Apple in cui è stata comunicata la partecipazione al programma di test (**mail a cui rispondere positivamente**). A seguito di ciò, verrà inserito tra i tester.

4) Essere abilitati al test dell'app Howdy:

una volta completato il punto 2), le daremo l'accesso all'utilizzo dell'app Howdy: riceverà una successiva mail indicante la disponibilità dell'applicativo.

5) Installare l'applicazione gratuita TestFlight di Apple (qui la descrizione: <https://apps.apple.com/it/app/testflight/id899247664>). Attraverso TestFlight le verrà notificata la possibilità di installare l'app Howdy nella versione attuale e nei successivi aggiornamenti.

